



Soczewki kontaktowe jednodniowe evO₂lution one day hydrogel daily contact lenses

Wprowadzenie

W niniejszej ulotce znajdują się ważne informacje na temat stosowania soczewek jednodniowych evO₂lution one day z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Prosimy o dokładne przeczytanie oraz zastosowanie się do zaleceń specjalisty.

1. Zastosowanie

Soczewki kontaktowe evO₂lution one day przeznaczone są do noszenia w trybie dziennym (nie można w nich spać) w celu korekcyjnych takich wad wzroku jak: krótkowzroczność, dalekowzroczność. Mają jednodniowy okres wymiany, co oznacza, że są jednorazowe (nie wymagają pielęgnacji).

2. Soczewek kontaktowych nie można stosować w następujących przypadkach:

- zapalenie przedniej komory oka,
- infekcja bakteryjna oczu,
- zaburzenia produkcji filmu łzowego,
- uraz lub zaburzenia wpływające na rogówkę lub spojówkę powiek,
- stosowanie leków, które stanowią przeciwwskazanie do noszenia soczewek kontaktowych,

- niedoczulica rogówki,
- przebyte wcześniej infekcje oka lub powiek, wcześniejsze przypadki wystąpienia jęczmienia, nietolerancji oraz niewłaściwej reakcji na soczewki kontaktowe,
- nieprzestrzeganie przez pacjenta zaleceń odnośnie harmonogramu i zasad użytkowania soczewek,
- reakcje alergiczne, które mogą być wywołane przez noszenie soczewek kontaktowych,
- jakakolwiek ogólnoustrojowa choroba, która oddziałuje negatywnie na oko przez noszenie soczewek kontaktowych,
- nieukończony proces gojenia się rogówki po operacji oka,
- zaczerwienienie lub podrażnienie oczu.

3. Ostrzeżenia

Pacjent powinien zostać poinformowany o następujących ostrzeżeniach dotyczących noszenia soczewek kontaktowych:

- Komplikacje powstałe na skutek stosowania soczewek kontaktowych mogą spowodować poważne uszkodzenia oczu. Istotne jest, aby pacjent postępował zgodnie z zaleceniami specjalisty i instrukcjami producenta dotyczącymi poprawnego użytkowania soczewek. Schorzenia oczu, w tym owróżdzenie rogówki, mogą rozwijać się w bardzo szybkim tempie i doprowadzić do trwałej utraty wzroku.
- Jeśli pacjent odczuwa dyskomfort, nadmierne łzawienie, zaburzenia widzenia lub zaczerwienienie oczu, powinien natychmiast zdjąć soczewki i skontaktować się ze specjalistą.

4. Użytkowanie soczewek

Soczewki jednodniowe wykonane evO₂lution one day mogą być użyte tylko raz. Po wyjęciu soczewek z oczu należy je wyrzucić. Maksymalny czas noszenia soczewek w ciągu dnia powinien zostać określony przez okulistę lub optometrystę. Soczewki jednodniowe evO₂lution one day nie są przystosowane do czyszczenia ani do dezynfekcji. Po użyciu należy je wyrzucić. Każdy okres użytkowania należy rozpoczynać od nowych soczewek. Ważne: Soczewki jednodniowe evO₂lution one day nie są przystosowane do stosowania w trakcie snu. Należy je zdjąć i wyrzucić przed pójściem spać.

Higiena osobista:

- przed kontaktem z soczewkami należy umyć i wysuszyć ręce (najlepiej unikać balsamów, mydeł, kremów lub perfum, które zostawiają ślad na rękach),
- nie można dotykać soczewek paznokciami, ani ostrymi przedmiotami,
- nie należy używać lakieru do włosów po założeniu soczewek. Spryskiwanie włosów powinno się odbywać przed aplikacją evO₂lution one day.
- nie należy używać leków, dezodorantów, kosmetyków itp. przed kontaktem z soczewkami.

Zakładanie soczewek evO₂lution one day:

1. Przed otwarciem blistra z soczewką należy ostrożnie nim potrząsnąć, następnie zerwać folię zabezpieczającą z pojemnika i przelać soczewkę wraz z płynem w zagłębienie dłoni lub, jeżeli to konieczne, delikatnie wyjąć ją z pojemnika palcem wskazującym.

2. Następnie trzeba umieścić soczewkę na czubku palca wskazującego prawej ręki (jeśli jest dominująca – najlepiej wyrobić sobie nawyk zaczynania zawsze od tej samej strony),

3. Należy się upewnić, czy soczewka znajduje się na dobrej stronie. Jej kształt powinien być idealnie półkolisty. Jeśli krawędzie wyginają się, soczewka jest wywinięta na drugą stronę.

4. Palcem drugiej ręki przytrzymać górną powiekę, zaś dolną wolnym palcem ręki trzymającej soczewkę. Przybliżyć soczewkę do oka i umieścić ją na nim.

5. Następnie należy na chwilę zamknąć oko. Soczewka powinna znajdować się na środku oka.

6. Procedurę trzeba powtórzyć dla drugiego oka.

Zdejmowanie soczewek evO₂lution one day:

1. Procedurę należy zacząć od dokładnego umycia i wysuszenia rąk.

2. Jeśli soczewka znajduje się w środkowej części oka, należy spojrzeć w górę i odciągnąć w dół dolną powiekę.

3. Następnie czubkiem palca wskazującego trzeba przesunąć soczewkę na białą część oka.

4. Przytrzymać kciukiem i palcem wskazującym soczewkę i następnie ją wyjąć.

5. Powtórzyć powyższe czynności dla drugiego oka.

Jeśli soczewka nie przesuwają się na oku (wydaje się, że utknęła) należy wkropić do niego kilka kropel roztworu nawilżającego i jeszcze raz spróbować ją przesunąć. Jeśli to nie pomaga, należy skontaktować się ze specjalistą w celu otrzymania dalszych instrukcji.

Po zdjęciu soczewek należy je wyrzucić. Kolejną aplikację rozpocząć od świeżej pary szkła.

5. Działania niepożądane

- dyskomfort lub uczucie ciała obcego w oku,
- pieczenie, klucie, swędzenie oczu,
- nadmierne łzawienie oka,
- zaczerwienienie oczu,
- suche oczy,
- zmniejszenie ostrości widzenia,
- nadwrażliwość na światło,
- dziwna wydzielina z oczu.

W przypadku wystąpienia powyższych problemów:

- w pierwszej kolejności należy zdjąć soczewki. Jeśli dolegliwości nie ustają, nie można zakładać nowej pary szkła. Należy skontaktować się ze specjalistą w celu omówienia dalszego stosowania soczewek kontaktowych.

- jeśli po zdjęciu soczewek dyskomfort minie, można spróbować założyć nowe soczewki. Jeśli znowu pojawią się dolegliwości, trzeba by niezwłocznie zdjąć i zasięgnąć opinii specjalisty.

- jeśli soczewki ulegną zabrudzeniu, należy założyć nową parę.

Wystąpienie któregośkolwiek z powyższych objawów może skutkować infekcją, wrzodem rogówki, neowaskularyzacją,

problemami z tętnówką. Należy bezzwłocznie zasięgnąć opinii lekarskiej i rozpocząć stosowne leczenie.

6. Środki ostrożności

W niektórych przypadkach noszenie soczewek kontaktowych nie jest zalecane. Jest to na przykład wykonywanie niektórych zawodów, przybywanie w zakurzonej, zadymionej, suchym lub wietrznym otoczeniu.

Podczas wyjmowania soczewek z pojemnika nie należy używać pęsety ani innych narzędzi. Osoby stosujące doustną antykoncepcję, mogą zauważyć zmiany w obrazie podczas stosowania soczewek.

Niektóre leki (przeciwhistaminowe, moczopędne, ułatwiające oddychanie, rozkurczowe, uspokajające) mogą wywoływać suchość oczu lub zaburzenia widzenia. W przypadku wystąpienia wspomnianych objawów, należy skonsultować sprawę z okulistą.

W zależności od zaawansowania tych objawów, można stosować środki zaradcze, jak krople nawilżające lub zrezygnować ze stosowania soczewek kontaktowych na czas przyjmowania leków.



Manufacturer: Supervision Optimax
Sdn Bhd 40160 Selangor, Malaysia.



EC Authorized Representative: Supermax Vision UK Limited
Peterborough PE1 5XN, United Kingdom.



IMPORTER
OptoCare Sp. z o.o.
ul. Makuszyńskiego 18,
31-752 Kraków, POLAND